

MUESTRA DE SANGRE - ESTUDIO GENÉTICO

- 1) Tomar muestra sangre entera en tubo EDTA (tapa morada), mínimo 4 ml. Ideal 6 ml.
- 2) Identificar la muestra: Por favor, etiquetar con la siguiente información en letra imprenta:
 - **Primer nombre y primer apellido**
 - Fecha de nacimiento: **DOB** (Date of birth) **MES - DÍA - AÑO**
 - Fecha toma de muestra: **CD** (Collection date): **MES - DÍA - AÑO**
 - **RUT del paciente**
- 3) Adjuntar orden médica y consentimiento e información que se adjunta.
- 4) El retiro de la muestra debe ser programado con 24 hrs. de antelación. Contactar a muestras@genometrics.cl o al 56 22 400 3886 para solicitar el retiro de la muestra, indicando:
 - Nombre paciente.
 - Dirección exacta de retiro.
 - Unidad específica (edificio, piso, unidad, etc)
 - Persona a cargo de la muestra.
 - Contacto de la persona a cargo.
 - Horario en que se puede retirar.
- 5) Para el retiro, la muestra debe estar protegida por sistema de **triple embalaje**, según la normativa IATA
 - N*1: Tubo EDTA + material absorbente (algodón u otro)
 - N*2: Bolsa bien sellada que contenga posible derrame.
 - N*3: La bolsa debe estar dentro de contenedor duro (p/e:metal, plumavit, cartón)

IMPORTANTE:

- *La muestra puede estar a temperatura ambiente hasta por 48 hrs . Se sugiere refrigerar a 5°C en caso de mantenerla por más tiempo. NUNCA CONGELAR.*
- *Para pacientes que fueron sometidos a transfusión sanguínea, se requiere un mínimo de 15 días de espera para tomar la muestra para el estudio genético.*
- *Para pacientes que fueron sometidos a trasplante de médula, por favor consultar con nosotros la factibilidad de tests genéticos y sus limitaciones.*

Equipo Genometrics.